

Leiðbeiningar um sendingu sýna til frumumeinafræði

Stungusýni:

Loftpurrkuð og/eða alkóhólfixeruð gler (20mín í 100% alkóhóli). Merkja gler (**L**) fyrir loftpurruð og (**F**) fyrir fixeruð. Senda sem fyrst en geymast í margar dagar við stofuhita.

Ef spurning um lymfoma- má senda sýni líka fyrir frumflæðisjá en passa að það komi fram á beiðni að þess sé óskað og ef spurning um sýkingu- er hægt að senda hluta sýnisins til sýkladeildar.

Ef spurning um cancer og nánari greiningu hans með mótefnislitun- sendið þá helst cellsuspension, þ.e. skola nál í 100% spritti.

VÖKVA:

Brjóst-Gollushús- og kviðarhols- - 10 ml, glas með þéttum tappa dugur. 1-2 dropar af heparíni settir út í hverja 10ml (ef mikið blóð). Senda helst strax, ef ekki hægt, geyma í kæli, og senda með fyrstu ferð. Óæskilegt að vökvinn verði mikið meira en tveggja daga gamall.

Lífvökvi eða bursa- ca 10ml.

Cystuvökvi- ef blóðugt , bæta heparin annars ekki. Senda strax. Geyma í kæli.

Mænuvökvi eða augavökvi – rétt rúmur 1ml dugur. Glas með þéttum tappa, senda strax, geyma í kæli. Berist rannsókn innan við sólarhring frá töku sýnis og helst strax.

Berkjustrok og berkjuskol:

Gler eru fixeruð í 100% alkóhóli í 20 mín. Skrifu **F**. Get senda með fyrstu ferð.

Glas með þéttum tappa. Sent ferskt, strax. Geyma í kæli.

Þvag (50ml) og Blöðruskol::

Þvagglass. Blanda jafnt hlutfall af þvagi og 100% alkóhóli. Senda strax. Geyma í kæli <24klst. Thinprep glös geymd við stofuhita og sýnið geymist þannig í nokkrar vikur.

Gallaburstasýni og skol:

Burstinn settur í glas með þéttum tappa. 10 ml af NaCl sett út í og hrist vel. Geyma í kæli og senda strax eða næsta dag.

Hráka:

Sendist helst ekki.